

# シャント血管可視化装置 アクセスビュー



シャント血管の可視化例



狭窄部位

近赤外光を手照射するだけで、  
シャント血管の可視化を可能にします。



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

# アクセスビューの仕組み



近赤外光を照射し、  
反射した近赤外光を  
上部カメラで撮影して画像化します。  
血中のヘモグロビンに吸収された  
箇所を黒く描出します。

## 製品特長

- 近赤外光を利用して、透析シャント血管を可視化します。
- 血管走行が見られることで、血管穿刺での成功率の向上が期待できます。
- 画像取り込みアプリケーションを活用した、シャント管理が可能です。

How to use "ACCESS VIEW"



## 製品仕様

製品名	カタログ番号	包装単位	備考
 アクセスビュー	FPM-AVR0-000	1台/箱	・電源アダプタ ・画像取り込みアプリ インストールDVD
 フロアスタンド	FPM-AV00-OP2	1台/箱	・バッテリー電源
オプション品	カタログ番号	包装単位	備考
 ビデオキャプチャー	FPM-AVR0-001	1台/箱	・DVI-Dケーブル ・USB3.0ケーブル
 専用パソコン (画像取り込みアプリ内蔵)	FPM-AVR0-002	1台/箱	・専用キーボード ・専用USB変換コネクタ

販売名：血管可視化装置アクセスビュー  
 一般的名称：可搬型手術用顕微鏡  
 届出番号：39B3X10001000002  
 主な仕様：固体撮像素子 有効画素数：1280(H)×1024(V)  
 光源用LED 素子中心波長：850nm  
 内蔵モニター 720(H)×1280(V)  
 外部映像出力 DVI-D画素数：1280(H)×1024(V) 60Hz  
 寸法 約W 110mm, D 65mm, H 229mm  
 質量 約0.9kg

## 総販売元

 **フォルテ グロウ メディカル 株式会社**

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647  
<http://www.fgm.co.jp/>

### 東京営業所 営業部 (問合わせ先)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51 第一スレートビル5階  
 TEL: 03-3863-1901 FAX: 03-3863-1905

### 製造販売業者 株式会社 プラス・メッド

第3種医療機器製造販売業 (許可番号39B3X10001号)  
 〒780-0083 高知県高知市北御座11番7号  
<http://www.plusmed.co.jp/>

## 取扱販売店