




造影用耐圧チューブ

CT用エクステンションチューブ

デュアル用 逆止弁付きエクステンションチューブ

特長

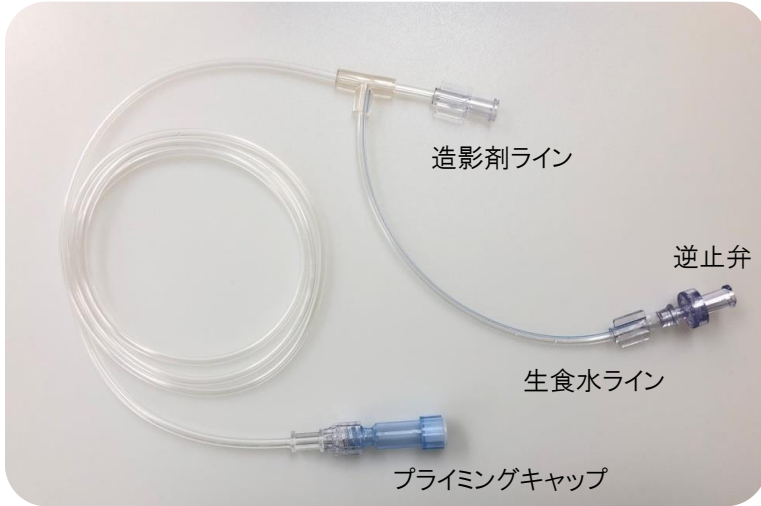

プライミングキャップ使用方法

プライミングキャップの先端を上向きにセットし、薬液を注入しライン内のエア抜きをします。

余分な薬液がキャップから漏れにくく、清潔にご使用できます。

チューブのプライミング方法

※プライミングメスキャップ対応型式の場合
型式末尾「～PP」



STEP①

生食水入りシリンジをルートに接続し、
両端のキャップ先端を上向きにセットして下さい。


薬液を注入し、チューブ内のエア抜きをします。
キャップ内に薬液が上がったらプライミング完了
です。



STEP②

プライミング後は、エア流入防止のため
キャップのフタを閉じて下さい。

シリンジや穿刺針等と接続する際は、
キャップを外してご使用下さい。

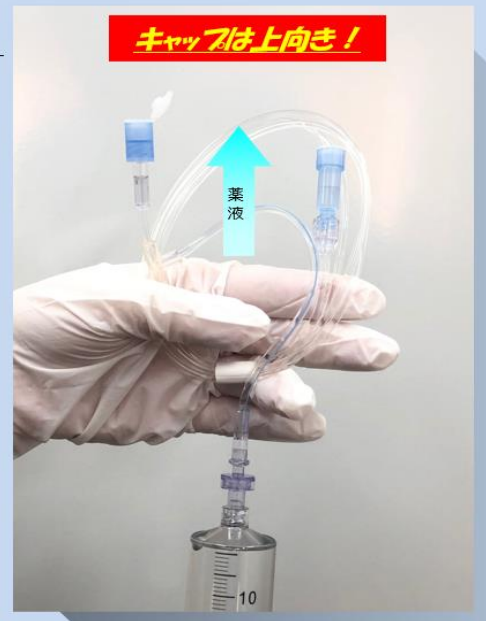

【取り扱い時の注意】 ●キャップに薬液を満した状態で長時間留置すると、フィルターから液漏れする恐れがあります。
●キャップを下向きにしてプライミングを行う場合、スムーズにエアが抜けないことがあります。



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

仕様

型式	逆止弁仕様	内径× 外径(mm)	長さ(mm)	内容量(ml)	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTY-1000P	生食水側逆止弁	1.5×3.0	1000	2.0	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471719
FGM-CTY-1500P			1500	2.9			4547319471795
FGM-CTY2-1000P	生食水側逆止弁	2.2×3.8	1000	4.6			4547319471917
FGM-CTY-125-CVP	生食水側逆止弁	1.5×3.0	1000 <small>三活付きチューブ +250</small>	2.4			4547319471764
FGM-CTY-160-CVP			1000 <small>三活付きチューブ +600</small>	3.1			4547319472372
FGM-CTY-1000RP	造影剤側逆止弁	1.5×3.0	1000	2.0			4547319471740
FGM-CTY-1500RP			1500	2.9			4547319471825
FGM-CTY-2000RP			2000	3.8			4547319471887

プライミングメスキャップ付き(シリンジ接続側)

型式	逆止弁仕様	内径× 外径(mm)	長さ(mm)	内容量(ml)	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTY-600PP	生食水側逆止弁	1.5×3.0	600	1.4	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471993
FGM-CTY-1000PP			1000	2.0			4547319471726
FGM-CTY-1000PP3			1000 <small>(サブルト300mm)</small>	2.3			4547319472020
FGM-CTY-1500PP			1500	2.9			4547319471825
FGM-CTY2-1000PP	生食水側逆止弁	2.2×3.8	1000	4.6			4547319471924
FGM-CTY2-1500PP			1500	6.6			4547319472341
FGM-CTY-1500RPP	造影剤側逆止弁	1.5×3.0	1500	2.9			4547319471832
FGM-CTY-2000RPP			2000	3.8			4547319471894

※●は受注生産品です。

一般的名称：造影用耐圧チューブ
販売名：CT用エクステンションチューブ
認証番号：302AABZX00018000

●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用ディスプレイ製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売業者



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本社 栃木県佐野市大橋町1647番地
東京営業所 TEL:03-3863-1901 FAX:03-3683-1905
<https://www.fgm.co.jp/>

販売元



ORTメディカル株式会社

本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289
<https://www.ort-medical.jp/>

取扱販売店