


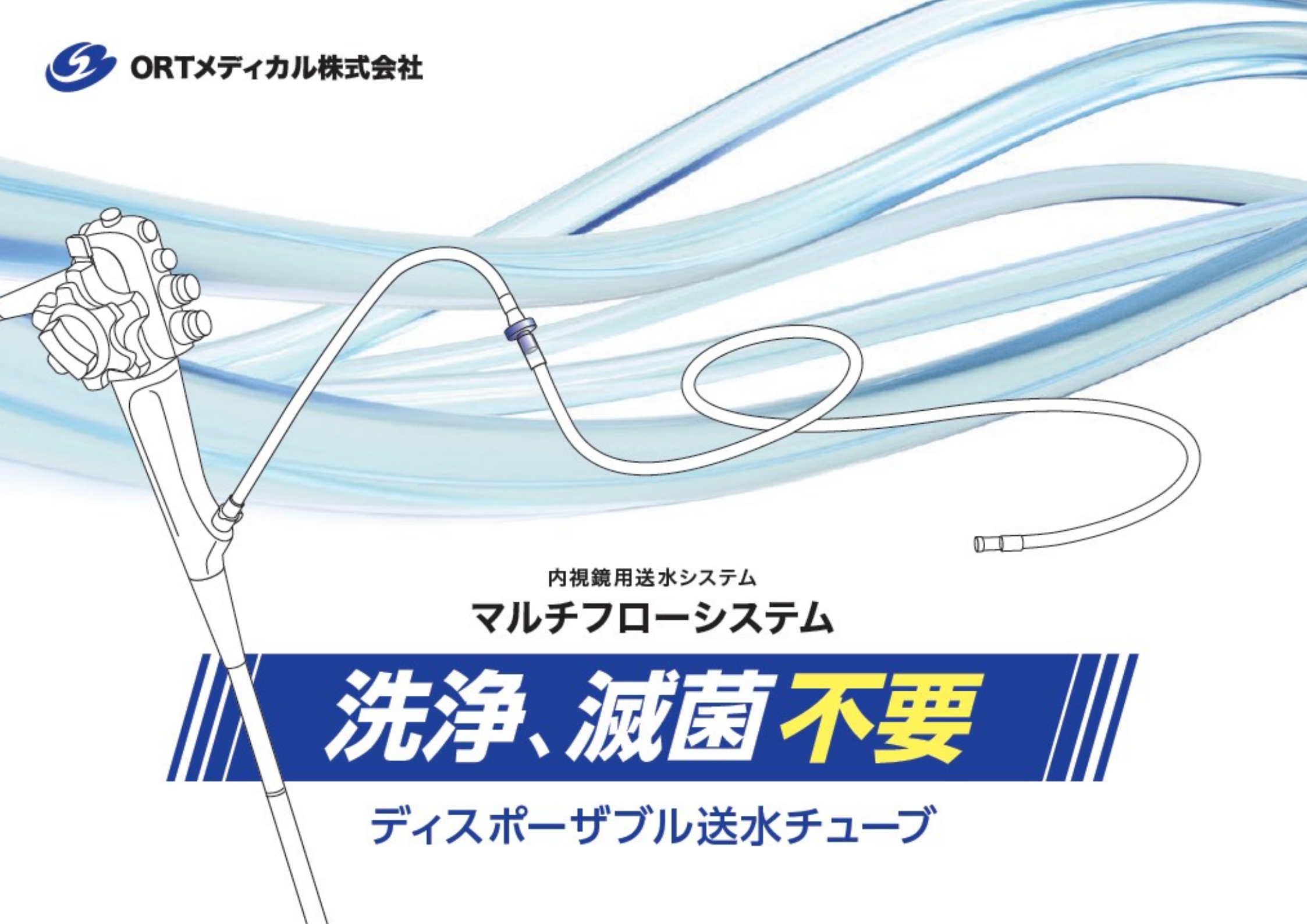

内視鏡用送水システム
マルチフローシステム

洗浄、滅菌不要

ディスポーザブル送水チューブ

マルチフローシステム



内視鏡用送水装置
ウォータープリーズ



ディスポーザブル
送水チューブ

構成



内視鏡検査での送水を
サポートする付属品


信頼性と安定性に優れた内視鏡用送水装置「ウォータープリーズ」。

豊富なバリエーションの滅菌済みディスポーザブル送水チューブをはじめ、安心・安定した送水を支える付属品を豊富にラインアップ。多様な内視鏡検査・治療を幅広くカバーする、ORTメディカルの「マルチフローシステム」です。

※イメージ


鉗子口からの送水

副送水口からの送水

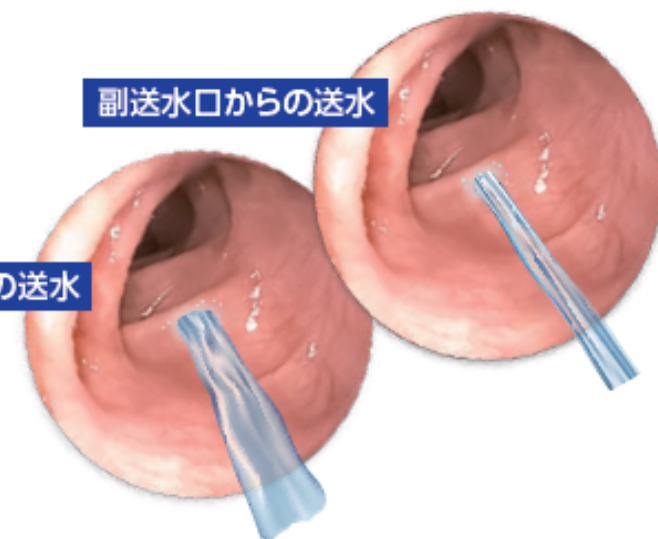

安全・安心のリプロセス不要の

ディスプレイザブル送水チューブ

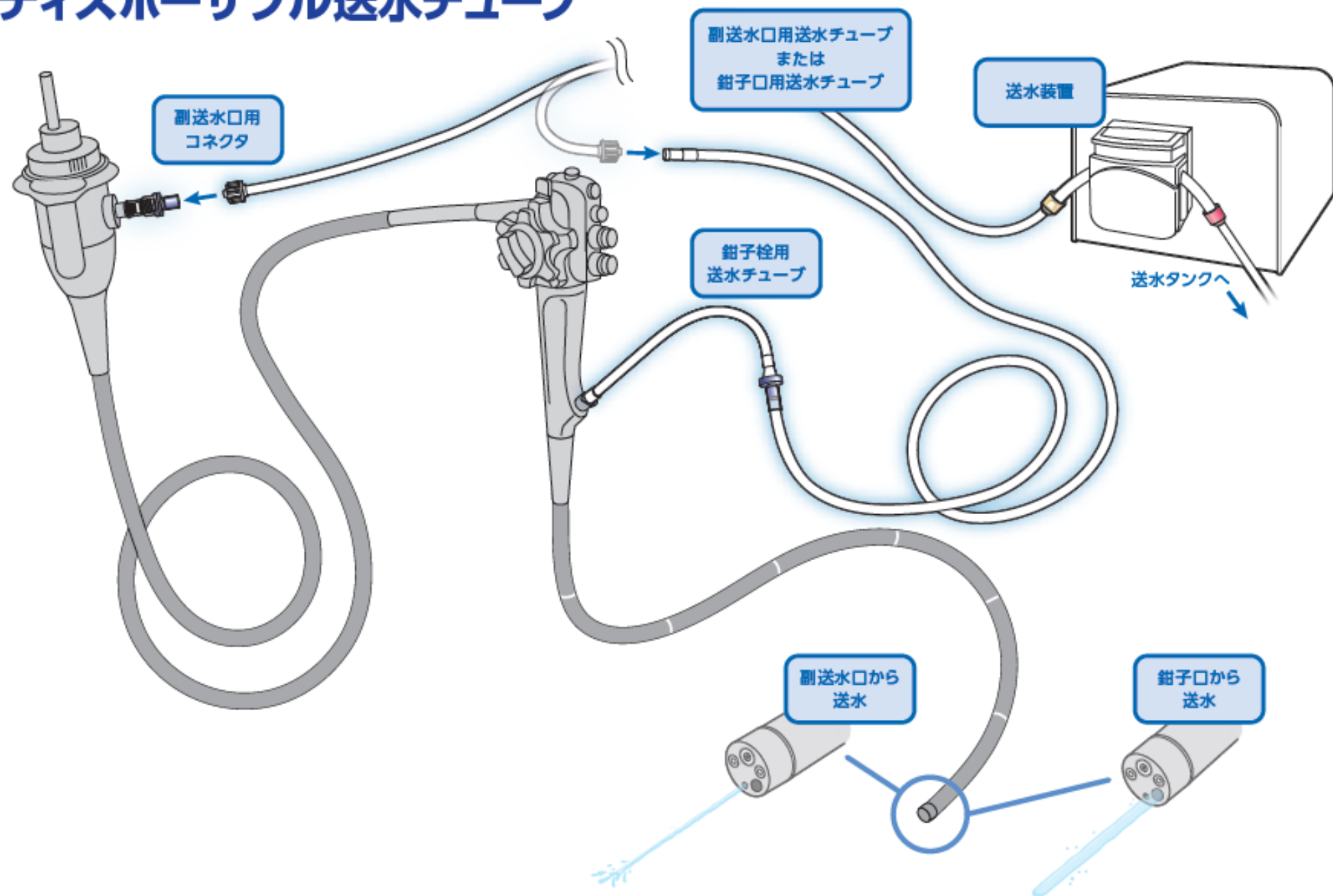

マルチフローシステム **4**つの特長

1

豊富な送水チューブ

スコープの鉗子口／副送水口、ESDデバイス、超音波内視鏡に対応する送水チューブをラインナップ。

ポンプチューブ1本で鉗子口・副送水口の両方に対応可能なチューブも備えております。



鉗子栓用送水チューブ



鉗子口用・副送水口用
送水チューブ



副送水口用コネクタ

2

術者に優しい


鉗子栓用送水チューブは、軽くてしなやかな素材によりポンプからの振動が伝わりにくく、スコープ操作の負担を和らげます。
また、先端の折れ曲げ防止加工により安定した流量が確保できます。



送水チューブは全てディスポーザブルで、送水タンクは使わずに薬液ボトルからの直接吸水を可能にし、検査終了後の「洗浄・消毒または滅菌」工程を不要にすることができます。

これにより医療従事者の負担軽減や業務効率化(働き方改革)に貢献します。

送水に関わる製品をディスポ運用にすることで、交差感染リスクへの配慮もしやすく、いつも清潔で安心して使える送水システムです。

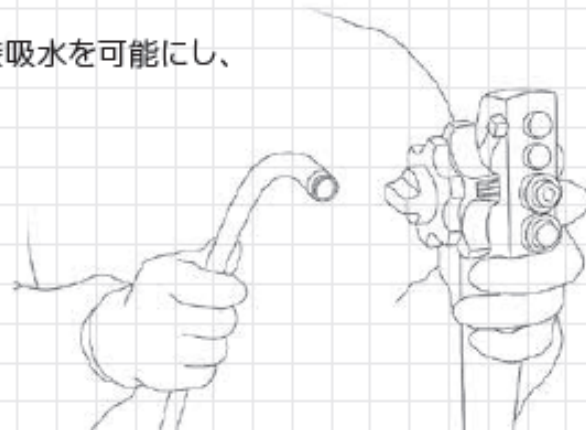


3 タンクの洗浄・保管が不要

ボトルコネクタは、付属の送水タンクを使わずに、生理食塩液や滅菌精製水等の薬液ボトルから直接吸水して送水できます。送水タンクの洗浄と消毒・保管が不要です。



4 安定した水量を維持

ポンプヘッドクランプは、送水装置のポンプヘッドに簡単に取り付けることができ、送水性能を維持・確認し安定した流量を得るための補助的治具です。

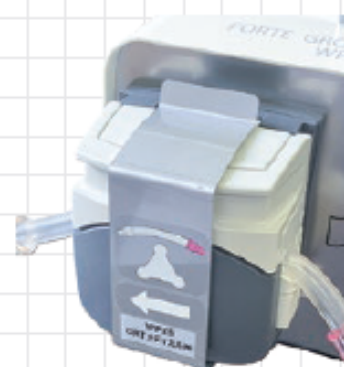

現場目線で開発した
マルチフローシステム

MULTI-FLOW SYSTEM

マルチフローシステムのラインナップ

【ディスプレイザブル送水チューブ】

送水用途	型式	梱包単位	希望小売価格	JANコード	全長	備考
鉗子栓用送水チューブ	AF-WT(逆止弁一体型)	50本/箱×4/ケース	25,000円/箱	4547319805804	約1,800mm	単回使用
鉗子栓用送水チューブ	AF-WT(逆止弁一体型ショートタイプ)	50本/箱×4/ケース	22,500円/箱	4547319805880	約950mm	単回使用
鉗子口用送水チューブ	OF-WPUA	10本/箱×4/ケース	6,300円/箱	4547319140035	約2,300mm	1日使用
鉗子口・副送水口兼用送水チューブ	MF-WPU-BYA	10本/箱×4/ケース	6,300円/箱	4547319140882	約2,500mm	1日使用
副送水口用送水チューブ	MF-WPU-SA	10本/箱×4/ケース	6,300円/箱	4547319140875	約2,000mm	1日使用
副送水口用コネクタ	MF-WVA	50本/箱×4/ケース	16,000円/箱	4547319140851	約30mm	単回使用
副送水口用コネクタ	AF-WV(逆止弁)	50本/箱×4/ケース	16,000円/箱	4547319805835	約30mm	単回使用
ESDデバイス用送水チューブ	MF-WPU-E	10本/箱×4/ケース	18,000円/箱	4547319140868	約3,850mm	単回使用

一般的名称：送気送水チューブ

販売名：ウォーターチューブ

届出番号：09B1X00004000129

【付属品】

品名	型式	梱包単位	希望小売価格	用途	備考
タンクコネクタ	MF-C01	1個/箱	7,500円/箱	ウォータータンク用	オートクレーブ滅菌対応
ボトルコネクタ	MF-C02	1個/箱	7,500円/箱	薬液ボトル用	オートクレーブ滅菌対応
ポンプヘッドクランプ	MF-PHC1	1個/箱	15,000円/箱	WP2S用治具	ステンレス製

希望小売価格に消費税は含まれておりません



一般的名称	内視鏡用送水装置	
販売名	ウォーターブリーズ2	ウォーターブリーズ
型式	WP2S	AF-WP1
認証番号	302AGBZX00071000	220AHBZX00007000
JANコード	4589770090511	4547319805866
希望小売価格	350,000円(税別)	298,000円(税別)
付属品	フットスイッチ/電源ケーブル/送水タンク (角型4L/角型2L/ブック型2L)から選択可	

販売元

 **ORTメディカル株式会社**

本社営業所

神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル9F
TEL.045-534-7015 FAX.045-534-7760

大阪営業所

TEL.06-6476-7300 FAX.06-6476-7289

<https://www.ort-medical.jp/>